

## Avantages

### Pour l'essayeur :

- simple à ajuster
- ajustement facile en utilisant des tubes interchangeables
- accès facile au tube trachéal, si nécessaire
- contrôle minutieux de la quantité de support
- adaptable à des cas asymétriques

### Pour le porteur et/ou l'Aide soignant :

- une minerve fraîche et confortable
- faible conservation de la chaleur
- facile à mettre et à enlever
- discrète; apparence effacée
- contact minimal avec la peau
- facile à garder propre
- support léger de la tête

## Tailles



CC01A



CC02C

La taille Adulte va à un enfant à partir de 10 ans jusqu'à un adulte de grande taille. La taille Enfant va à des enfants de, à peu près, 1 an jusqu'à 10 ans. La minerve canadienne est pré-assemblée et prête à ajuster.

## Références:

Pour plus de lectures et d'exemples cliniques :  
"The Canadian Collar: A New Cervical Spine Orthosis"  
Hannah R.E., Cottril, S.D.  
Am. Journal Occupational Therapy, pp 171-177,  
March, 1985, Vol. 39, Number 3

## Accessoires

### Grande mentonnière CCOLC

La grande mentonnière donnera un support latéral plus large. Il peut aussi être utilisé comme un support occipital.



### Mentonnière pour petit enfant CCOFC

La taille de mentonnière Petit-enfant va à des enfants aussi jeunes que 6 mois. La mentonnière montrée au milieu est standard.

### Tubes et T de jonction supplémentaires CCOXT

Des tubes supplémentaires peuvent être ajoutés pour donner un support latéral et pour adapter à des cas difficiles. Ces tubes supplémentaires sont des tubes de 6,3cm; 7,6cm et 8,9cm. 4 T de jonction sont aussi inclus dans le lot d'accessoires CCOXT.



### D'autres excellents produits de Symmetric Designs

La minerve OTT  
pour petits enfants

Orthèse canadienne  
sérielle

La minerve  
Headmaster



[www.symmetric-designs.com](http://www.symmetric-designs.com)

# La Minerve Canadienne



## Pour un support léger de la tête

La minerve canadienne est conçue pour soulager la douleur et les symptômes neurologiques qui sont fréquemment liés aux troubles des vertèbres cervicales.

Cette minerve innovatrice convient dans le cas de polyarthrite rhumatoïde et d'ostéo-arthrite, de sclérose latérale amyotrophique, de sclérose en plaque, de traumatisme cervical, de brûlure et d'autres infirmités nécessitant un contrôle léger de la tête et du cou.



Symmetric Designs

125 Knott Place, Salt Spring Island, BC V8K 2M4, CANADA

mél: [sales@symmetric-designs.com](mailto:sales@symmetric-designs.com)

[www.symmetric-designs.com](http://www.symmetric-designs.com)

Tél: 1-250-537-1724 Télécopie: 1-250-537-1998

# Instructions d'ajustage

**La minerve canadienne** est extrêmement ajustable. Dans la plupart des cas elle peut être ajustée juste avec les tubes postérieurs et antérieurs.



Pour un support latéral supplémentaire, des tubes peuvent être ajoutés sur les cotés

## Etape 1

Enlever la mentonnière et le plastron.

Enlever les tubes antérieurs blancs.  
Retirer le T de jonction du bout du tube en pvc



## Etape 2

Déterminer la longueur nécessaire du tube en pvc autour du cou.

Sélectionner la longueur des tubes antérieurs.

Laisser de la place pour la mentonnière et pour le plastron



## Etape 3

Tailler le tube en pvc à la bonne longueur. Laisser un peu de longueur en plus afin d'avoir un ajustement qui soit confortable.

Ne couper pas le tube trop court



## Etape 4

Remettre le T de jonction et les tubes antérieurs.  
Remettre la mentonnière et le plastron.



## Etape 5

Vérifier l'ajustement.

Puis ajuster la mentonnière en coupant le tube en pvc.

Tailler le tube en pvc du haut mettra en place la mentonnière.

Tailler le tube clair en pvc du bas mettra en place le plastron.



## Contrôle final

Vérifier que la minerve est bien symétrique et que le plastron est confortable sur la poitrine.

Des tubes supplémentaires peuvent être ajoutés pour un support latéral. (Voir photo).

Des tubes et des T de jonctions supplémentaires sont disponibles dans un lot d'accessoires. (Voir au verso)

Les tubes peuvent être coupés avec un couteau bien aiguisé.

Le tube blanc à l'arrière doit reposer de façon confortable derrière la tête. Ajouter du rembourrage entre les T de jonction si nécessaire pour un confort supplémentaire.

La minerve se met en insérant la mentonnière dans le tube de devant à la gauche de la minerve. Le plastron doit être inséré ensuite.



*Symmetric Designs n'accepte aucune responsabilité résultant d'un mauvais usage de ce produit*