

Vorteile

Für den Techniker:

- einfach anzupassen
- leichte Anpassung durch den Gebrauch von austauschbaren Schläuche
- falls notwendig, guter Zugang zu einem trachealen Schlauch
- Anpassungsfähig bei asymmetrischen Fällen

Für den Patienten und/oder Pfleger:

- luftige, bequeme Halskrause
- wenig Hitzestau
- leicht an- und abzulegen
- unauffällige Erscheinung
- minimaler Kontakt mit der Haut
- leichte Stütze für den Kopf

Größen



CC01A



CC02C

Größe für Erwachsene: passend ab 10 Jahren.

Größe für Kinder: passend von 1 bis 10 Jahren.

Die kanadische Halskrause ist vorgefertigt und bereit zur Anpassung.

Empfehlungen:

Für weiteres Nachlesen und klinische Beispiele:

“Die kanadische Halskrause: Eine neue Halswirbelsäulen-Orthese” Hannah R.E., Cottril, S.D.

Amerikanisches Magazin über berufsbezogene Therapien, 171-177,

März 1985, Buchband 39, Nummer 3

Zubehör

Großes Kinnstück CCOLC

Das große Kinnstück gibt eine weitere, seitliche Stütze. Es kann auch zur Stütze des Hinterkopfes verwendet werden.



Kinnstück für Säuglinge CCOFC

Das Kinnstück in der Säuglings Größe is geeignet für Kinder ab 6 Monate. Das mittlere im Bild gezeigte Kinnstück ist standard.

Extra Schläuche und

T-Anschlussstücke CCOXT

Bei schwierigen Fällen können extra Schläuche für eine zusätzliche, seitliche Stütze hinzugefügt und speziell angefertigt werden.



Die zusätzlichen Schläuche sind 6mm, 7.5mm und 9mm, 4 extra T-Anschlussstücke sind zusätzlich in dem CCOXT Zubehör-Paket inbegriffen. Andere Schlauch-Größen sind auf Anfrage erhältlich.



Weitere ausgezeichnete Produkte von Symmetric Designs

Torticollis Halskrause



Knie & Ellbogen Orthese



Headmaster Halskrause



www.symmetric-designs.com



Die Kanadische Halskrause



Eine leichtgewichtige Stütze für den Kopf

Die kanadische Halskrause wurde entwickelt, um Schmerzen und neurologische Symptome, häufig verursacht durch viele Funktionsstörungen der Halswirbelsäule, zu lindern.

Diese neue Halskrause ist anwendbar bei Rheuma und Arthrose, ALS, Multiple Sklerose, Schleudertrauma, Brandwunden und anderen Behinderungen, die eine Kopf- und Nackenkontrolle benötigen.



Symmetric Designs

125 Knott Place, Salt Spring Island, BC V8K 2M4, CANADA

email: sales@symmetric-designs.com

www.symmetric-designs.com

Tel: 250-537-2177 Fax: 250-537-1998

Gebrauchsanweisung

Die kanadische Halskrause ist äußerst anpassungsfähig. In den meisten Fällen kann sie nur mit den vorderen und hinteren Schläuchen angepasst werden. Für eine zusätzliche seitliche Stütze können Schläuche hinzugefügt werden.



Stufe 3
Schneiden Sie die PVC Schläuche der Länge nach. Lassen Sie sie ein bisschen länger um sie bequem anbringen zu können. Schneiden Sie die Schläuche nicht zu kurz.



Stufe 1

Entfernen Sie das Kinn-Stück und die Brustplatte. Entfernen Sie die vorderen, weißen Schläuche. Ziehen Sie das T-Anschlussstück an den Enden der klaren PVC Schläuche raus..



Stufe 4

Ersetzen Sie das T-Anschlussstück und die vorderen Schläuche. Ersetzen Sie Kinn-Stück und Brustplatte



Stufe 2

Stellen Sie fest, wie lang die klaren PVC Schläuche um den Nacken herum sind. Wählen Sie die Länge der vorderen Schläuche. Lassen Sie etwas Abstand für Kinn-Stück und Brustplatte.



Stufe 5

Prüfen Sie die Passform. Stimmen Sie die Position vom Kinn-Stück ab, indem Sie die klaren PVC Schläuche zurechtschneiden. Wenn die oberen PVC Schläuche geschnitten wurde, wird das Kinn-Stück eingezogen. Wenn die unteren klaren PVC Schläuche geschnitten wurden, wird die Brustplatte festgezogen.



Letzte Kontrollen

Prüfen Sie, ob die Halskrause symmetrisch angepasst ist und ob die Brustplatte bequem am Brustkorb sitzt.

Zusätzliche Schläuche können für eine seitliche Stütze hinzugefügt werden. (siehe Foto) Zusätzliche Schläuche und T-Anschlussstücke sind als Zubehörteile im Paket erhältlich. (siehe Rückseite) Die Schläuche können mit einem scharfen Messer geschnitten werden.



Die Hinterseite der weißen Schläuche sollte bequem am hinteren Kopf sitzen. Falls notwendig, kann eine Polsterung zwischen den T-Anschlussstücken für extra Komfort hinzugefügt werden.



Beim Anlegen der Halskrause wird das Kinn-Stück in die vorderen Schläuche auf der linken Seite der Halskrause eingefügt.



Symmetric Designs trägt keine Haftung bei Falschanwendung von diesem Produkt.