

Individuelle Einzelteile

Vorteile

Manschetten in Proximal oder Distal (Schrauben sind inbegriffen)


Artikel	A	
	in	cm
CUFF 12	12	30
CUFF 11	11	28
CUFF 10	10	25
CUFF 9	9	23
CUFF 8	8	20
CUFF 7	7	18
CUFF 6	6	15
CUFF 5	5	13
CUFF 4	4	10
CUFF 3	3.5	9



Die Größe der Manschette ist die Hälfte des Umfangs. Zum Beispiel; ein CUFF7 passt um den Umfang eines 14" (35cm) Körperglieds.

Seitliche Stäbe (Paare)

Artikel	L	
	in	cm
BAR 19	19	48
BAR 17	17	43
BAR 15	15	38
BAR 13	13	33
BAR 11	11	28
BAR 09	9	23
BAR 07	7	18
BAR 05	5	13

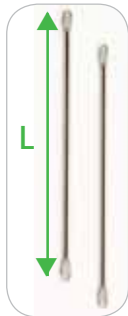

Diese polierten, rostfreien Stäbe werden paarweise geliefert.

Knie & Ellbogen Polster

Artikel	b		c	
	in	cm	in	cm
PAD60	6	15	7	18
PAD50	5	13	6.5	17
PAD45	4.5	12	6	15
PAD40	4	10	5	13
PAD35	3.5	9	4	10



Die Polster sind weich und passen sich der Körperform an. Das Klettband kann der Länge nach zurechtgeschnitten werden.

Für eine fortlaufende Behandlung von Knie & Ellbogen

- in vielen Größen erhältlich
- Optimal für eine effektive, fortlaufende Behandlung
- Schnell und einfach anzulegen
- Dünn und unauffällig

Diese Orthesen sind speziell für fortlaufende Behandlungen von Knie und Ellbogen Dehnungskontrakturen entwickelt worden. Die Orthesen sind schmal, leicht und stabilisierend am Gelenk. Sie sind für den nicht-stationären Gebrauch entwickelt worden. In Kombination mit Stretchübungen sind die besten Ergebnisse zu erzielen.



Die einzigartigen Manschetten sind vorgeformt und lassen sich einfach in die gewünschte Form biegen. Das Gelenk wird bequem von der Manschette umfasst. Dennoch ermöglichen die inneren Rillen eine Zirkulation der Luft. Um auch Sondergrößen verwenden zu können, sind alle Bestandteile austauschbar.

Weitere ausgezeichnete Produkte von „Symmetric Designs“

Torticollis Halskrause



Die Headmaster Halskrause



Rollstuhl Kopfstützen



Symmetric Designs

www.symmetric-designs.com



Kanadische Knie & Ellbogen Orthesen (serienmäßige)



Für eine fortlaufende Behandlung von Knie & Ellbogen

Diese neuen Orthesen sind für eine fortlaufende Behandlung von Knie & Ellbogen mit einer Dehnungskontraktur vorgesehen. Sie sind für eine Vielzahl von neuromuskulären und orthopädischen Behinderungen geeignet.

Die Orthesen bieten einen erweiterten, festen Nachdruck durch die Polster. Die Gurte sind einfach anzulegen.



Symmetric Designs

125 Knott Place, Salt Spring Island, BC V8K 2M4, CANADA

email: sales@symmetric-designs.com

www.symmetric-designs.com

Tel: 250-537-2177 Fax: 250-537-1998

Anleitung

Das Körperglied sollte soweit wie möglich gestreckt sein, bevor die Orthese angepasst wird. Der Abstand vom mittleren oberen Arm bis zum mittleren unteren Arm muss gemessen werden. (Für die Knie; messen Sie sie vom mittleren Oberschenkel bis zum mittleren Unterschenkel, das Bein sollte soweit wie möglich gestreckt sein). Dieses Maß setzt die Länge der Seitenleisten fest.

Der Umfang sollte an den oberen und unteren mittleren Punkten vom Körperglied gemessen werden. Die Größe der Manschette ist die Hälfte des Umfangs. Zum Beispiel, eine 7er Manschette passt um ein Körperglied mit einem Umfang von 14 inch.

Die Knie und Ellbogen Polster werden nach den Manschetten Größen angepasst.

Das Körperglied sollte soweit wie möglich gestreckt sein um die Orthese anzupassen. Die Gurte für die Knie und Ellbogen Polster sollten enganliegend sein und die überflüssigen Gurte sollten abgeschnitten werden. Die Gurte können enger angebracht werden, wenn die Dehnungskontraktur reduziert ist. Die besten Erfolge sind in Kombination mit Dehnübungen zu erzielen.



Entwerfen Sie eine maßgeschneiderte serienmäßige Orthese: Wählen Sie die Einzelteile aus der folgenden Tabelle. Jede Orthese benötigt eine distale und eine proximale Manschette, welche auf die Maße des Körpergliedes abgestimmt ist. Jede Orthese benötigt zwei Seitenleisten, die sowohl auf die Maße von „L“ als auch auf die der Polster bezogen sind.

Ellbogen Orthese



Standard Größen

Model	Größe	Umfang mittlerer Unterarm (cm)	Umfang mittlerer Bizeps (cm)
ELB01	Groß	23 - 28	28 - 33
ELB02	Mittel	18 - 23	23 - 28
ELB03	Klein	15 - 20	18 - 23
ELB04	Kind	13 - 18	15 - 20

Die Standard Ellbogen-Orthesen sind montiert und benötigen die Einzelteile in der folgenden Tabelle:

Model	Seitenleiste	Proximal	Distal	Polster
ELB01	BAR11	CUFF6	CUFF5	PAD45
ELB02	BAR09	CUFF5	CUFF4	PAD40
ELB03	BAR07	CUFF4	CUFF3	PAD40
ELB04	BAR05	CUFF3	CUFF3	PAD35

Maßgeschneiderte Größen sind erhältlich

Knie Orthese



Standard Größen

Model	Größe	Umfang mittlerer Wade (cm)	Umfang mittlerer Oberschenkel (cm)
KE001	Groß	38 - 43	48 - 53
KE002	Mittel	33 - 38	43 - 48
KE003	Klein	28 - 33	38 - 43
KE004	Junior	23 - 28	33 - 38
KE005	Kind	18 - 23	28 - 33

Die Standard Knie Orthesen sind montiert und benötigen die Einzelteile in der folgenden Tabelle:

Model	Seitenleiste	Proximal	Distal	Polster
KE001	BAR15	CUFF10	CUFF8	PAD60
KE002	BAR13	CUFF9	CUFF7	PAD50
KE003	BAR11	CUFF8	CUFF6	PAD50
KE004	BAR09	CUFF7	CUFF5	PAD45
KE005	BAR07	CUFF6	CUFF5	PAD45

Maßgeschneiderte Größen sind erhältlich