

Beneficios

Para el Ajuste

- Simple de colocar
- Ajuste fácil usando las mangueras intercambiables
- Buen acceso al conducto traqueo, si se requiere
- Control delicado de la cantidad de apoyo
- Adaptable a casos asimétricos

Para el usuario y/o enfermero, asistente

- Collarín fresco y cómodo
- Baja retención de calor
- Fácil de ponerse y quitarse
- Diseño sencillo y apariencia discreta
- Contacto mínimo con la piel
- Fácil de mantenerse limpio
- Soporte de peso ligero para la cabeza

Tallas



CC01A



CC02C

La talla de adulto es para 10 años en adelante hasta adulto (talla grande). La talla de niño es de aproximadamente 1 año a 10 años de edad. El collarín Canadiense esta pre-ensamblado y listo para usarse

Accesorios

Pieza Grande para barbilla CCOLC

La pieza larga para barbilla proporciona un amplio soporte lateral. Puede ser usada también como soporte occipital.



Pieza Infantil para barbilla CCOFC

La pieza infantil para barbilla es adecuada para usarse en niños desde 6 meses de edad. La pieza mediana de barbilla mostrada es medida estándar.

Mangueras y uniones - T extra CCOXT

Mangueras extra pueden agregarse para proporcionar un soporte lateral mas adecuado en casos difíciles. Las mangueras extra son de 6.3 cm, 7.6 cm y 8.9 cm, 4 uniones-T extra se incluyen también en el paquete CCOXT de accesorios. Otras medidas de mangueras encuentran disponibles también sobre pedido.



Más productos finos de Diseños Simétricos

Collarin
TOT



Ortosis Para
rodilla y codo



Collarin
Headmaster



www.symmetric-designs.com 

El Collarín Canadiense



Para un soporte ligero de la cabeza.

El Collarín Canadiense está diseñado para aliviar el dolor y los síntomas neurológicos comunes de varios problemas cervicales.

Este innovador Collarín es para apropiado para usarse en Artritis Reumatoide y en Osteoartritis, ALS, Múltiple esclerosis, problemas de las cervicales, quemaduras y otras incapacidades que requieran un control de cuello y cabeza con un peso ligero.



Symmetric Designs

125 Knott Place, Salt Spring Island, BC V8K 2M4, CANADA

email: sales@symmetric-designs.com

www.symmetric-designs.com

Tel: 250-537-2177 Fax: 250-537-1998

Instrucciones de Ajuste

El collarín Canadiense es altamente ajustable. En la mayoría de los casos puede usarse solamente con las mangueras anteriores y posteriores. Para soporte adicional lateral, pueden agregarse mangueras laterales.



Paso 1

Remueva la pieza de la barbilla y la placa del pecho. Remueva las mangueras blancas posteriores. Saque las uniones-T de las puntas de la manguera transparente de pvc.



Paso 2

Determine el largo del tubo transparente de pvc .alrededor del cuello.


Seleccione el largo de las mangueras posteriores.

Deje espacio para la pieza de la barbilla y para la placa del pecho.



Paso 3

Recorte el largo de la manguera de pvc. Deje un poco más extra para ajustarlo a la medida. No recorte la manguera demasiado pequeña.

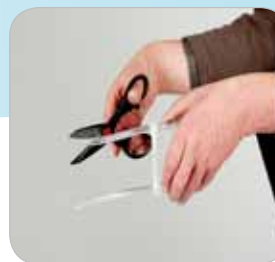

Paso 4

Recoloque las uniones T y las mangueras posteriores. Recoloque la pieza de la barbilla y la placa del pecho.



Paso 5

Cheque la medida.

Ajuste la posición de la pieza de la barbilla recortando la manguera transparente de pvc.

Recortando la manguera alta de pvc. va a retraer hacia adentro la pieza de la barbilla.

Recortando la manguera transparente de pvc . va a retraer hacia adentro la placa del pecho.



Pruebas Finales

Cheque que el collarín se ajuste simétricamente y que la placa del pecho se sienta cómoda en el pecho.

Mangueras extra se pueden agregar para soporte lateral. (se muestran) Mangueras extra y uniones-T están disponibles como paquete de accesorios. (Vea el lateral). Las mangueras se pueden recortar con un cuchillo filoso.

Las mangueras traseras blancas deben descansar cómodamente en la parte posterior de la cabeza. Agregue acojinamiento entre las uniones-T si es necesario para una comodidad extra.

El collarín se coloca insertando la pieza de la barbilla dentro de la manguera del frente a la izquierda del collarín. Después se inserta la placa del pecho.

