

## Beneficios

### del Collarín Headmaster:

- Fácil de ajustarse
- Buen acceso para tubo traqueal si es necesitado.
- Accesorios disponibles (Ver WEB)
- Soporte firme para la cabeza
- Collarín cómodo y ligero
- Retención mínima de calor.
- Fácil de poner y quitar
- Fácil de mantenerlo limpio
- Se lava con una esponja, jabón, agua tibia y secar al aire.

## Tallas y Colores



Beige



Gris

Talla Grande, Mediana, Pequeña, Junior y Niño.

## Accesorios

### Almohadillas para la extensión

Modelo	Talla	Se ajusta
HMCPL	Grande	Grande & Mediana
HMCPS	Pequeña	Pequeña & Junior
HMCPC	Niño	Niño



Dos Almohadillas pueden ser variablemente colocadas para dar un apoyo lateral o de extensión.

### Almohadillas de cuello

Modelo	Talla	Se ajusta
HMNPL	Grande	Grande & Mediana
HMNPS	Pequeña	Pequeña & Junior
HMNPC	Niño	Niño



Una almohadilla colocada centralmente para una resistencia de la extensión cómoda.

### Soporte o apoyo anterior

Modelo	Talla	Se ajusta
AST 01	Grande	Grande & Mediana
AST 02	Pequeña	Pequeña & Junior
AST 03	Niño	Niño



Un tubo anterior adicionado (y una almohadilla para la barbilla) para proporcionar un apoyo firme contra la flexión.

### Más productos finos de Diseños Simétricos

Collarín  
TOT



Ortesis Para  
rodilla y codo



Descansos para  
cabeza para silla  
de Ruedas.



[www.symmetric-designs.com](http://www.symmetric-designs.com)



# El Collarín Headmaster™



**El Headmaster™** es el collarín de elección para el mejor control de la cabeza. Este collarín proporciona excelente soporte a la caída de la cabeza y hace que mires en una posición normal, aliviando así los dolores de la musculatura del cuello. Se puede dar la forma al collarín fácilmente con la mano para ajustarlo adecuadamente. Cada collarín es hecho a mano de materiales de alta calidad.



Symmetric Designs

125 Knott Place, Salt Spring Island, BC V8K 2M4, CANADA

email: [sales@symmetric-designs.com](mailto:sales@symmetric-designs.com)

[www.symmetric-designs.com](http://www.symmetric-designs.com)

Tel: 250-537-2177 Fax: 250-537-1998

# Instrucciones de uso

## ¿ Como elegir la talla correcta ?

- Hay que medir la distancia "a" debajo de la mandíbula desde la mitad de la barbilla hasta el ángulo de la mandíbula.
- Seleccionar siempre en caso de duda la talla más pequeña entre dos longitudes de la tabla.



Tallas	'a'		Tallas y Colores	
	in.	cm.	Gris	Beige
<b>Grande</b>	5	13	HMC01-G	HMC01-B
<b>Mediana</b>	4.5	11.5	HMC02-G	HMC02-B
<b>Pequeña</b>	4	10	HMC03-G	HMC03-B
<b>Junior</b>	3.5	9	HMC04-G	HMC04-B
<b>Niño</b>	3	7.5	HMC05-G	HMC05-B

**¡ PRECAUCIÓN !**

Este producto contiene **LÁTEX**, el cual podría ocasionar reacciones alérgicas



Libre de Latex	
Tallas - Gris	
<b>Grande</b>	HMCF1-G
<b>Mediana</b>	HMCF2-G
<b>Pequeña</b>	HMCF3-G
<b>Junior</b>	HMCF4-G
<b>Niño</b>	HMCF5-G

Los collarines Headmaster pediátricos son más suaves y pueden ser colocados en niños tan jóvenes como 6 meses.

## ¿ Como dar la forma adecuada al Collarín ?

- Doblar el collarín a la altura y anchura deseada.
- Se mantendrá de la forma que usted lo ponga..



- Doblar el collarín para aliviar los huesos de la clavícula si es necesario.
- Un soporte de barbilla puede ser añadido a la parte pectoral del collarín para un almohadillado adicional si es requerido.



- Use accesorios para un apoyo extra de la flexión y extensión (ver al dorso).



## Comprobaciones Finales

- Comprobar que el collarín esté ajustado adecuadamente debajo de la barbilla.
- La cincha de sujetar debe estar en la parte de detrás alrededor del cuello.



Para un apoyo adicional use la almohadilla de cuello o las almohadillas de extensión para resistir la extensión del cuello.

## Usando el Collarín Headmaster™

- ✓ Es recomendable que un profesional cualificado ajuste este collarín.
- ✓ Aseguresé que ha sido elegida la talla correcta.
- ✗ No acoplar este collarín a ningún otro equipo o soporte.
- ✓ Se lava con una esponja, jabón, agua tibia y secar al aire

*Symmetric Designs no se hace responsable de la mala aplicación de este producto.*