

Beneficios

Para la persona:

- Fácil de ajustar (el reposacabezas puede ser deformado con la mano).
- Se ajusta al modelo de hardware de tres puntos.
- Uso opcional de la banda de la cabeza (incluida) para un soporte anterior adicional.
- Las almohadillas son fácilmente deformadas con la mano cuando el paciente está reposicionado.

Para el cuidador:

- Un cómodo y fresco reposacabezas, el diseño modular de los almohadillados permite la circulación del aire.
- Baja retención de calor.
- Fácil de poner y quitar.
- Contorno y apariencia discreta.
- Fácil de mantenerlo limpio (limpiar con una esponja, jabón, agua y dejar al aire).
- Control total de la cabeza.

Tallas y colores



- Disponible en tallas de Adulto y Pequeña/ Pediátrico
- Disponible actualmente sólo en negro.

Accesorios

Almohadilla lateral

Part # SAVANT-SP

- para apoyo lateral adicional



Esta apoyo puede ser también usado como un montaje de interruptor.

Adaptador Whitmyer

Part # SAVANT-WA

- Este adaptador permite al Savant ser ajustado a una bola de 7-10 cm/hardware de montaje Whitmyer.



Adaptador Netti

Part # SAVANT-NA

- Este adaptador permite al Savant ser ajustado al Hardware de montaje Netti.



Hardware de montaje de reposacabezas

Part #HRHCO

- Incorpora una bola de acero de 2,5 cm permitiendo un ajuste universal.
- Recubierto con una película de nylon duradera que mantiene su apariencia durante más tiempo.



Más Productos Finos de Symmetric Designs

Collarín
Headmaster



Collarín
TOT



Descansos para
cabeza para silla
de Ruedas.



EU Registered Office for CE Technical Documentation:

Medical Engineering Consultants
28 Greville Park Avenue
Ashted, Surrey, KT21 2QS, UK
Tel/Fax 01372-274456



El Reposacabezas Savant™



Un reposacabezas de sillas de ruedas para un total control de la cabeza

El reposacabezas Savant™ es un soporte nuevo y único para la cabeza. Es fresco, ligero y puede ser fácilmente manipulado con la mano. Proporciona apoyo a tres niveles de la cabeza controlando la flexión lateral y la rotación. Una banda en la cabeza puede ser usada para el control de la flexión.



Symmetric Designs

125 Knott Place, Salt Spring Island, BC V8K 2M4, CANADA

email: sales@symmetric-designs.com

www.symmetric-designs.com

Tel: 250-537-2177 Fax: 250-537-1998

Instrucciones de uso

¿Cómo elegir la talla correcta?

El Savant está disponible en dos tallas:

- Adulto
- Pequeño/Pediátrico



Características

El reposacabezas Savant es un soporte nuevo y único para la cabeza. Es fresco, ligero y puede ser ajustado fácilmente con la mano. Proporciona apoyo a tres niveles de la cabeza y control lateral y de la rotación.

Una banda para la cabeza puede ser usada para un soporte anterior.

- La banda de contorno discreto da soporte anterior.
- Abrazaderas de apertura fácil mantiene la banda en su lugar.



- Apertura fácil para un ajuste correcto.
- Almohadillas laterales altas proporcionan un efectivo control de la flexión lateral.
- Almohadillas laterales medias se les dan la forma para mayor comodidad detrás de las orejas.
- Almohadillas suboccipitales dan un apoyo extra debajo de la mandíbula.
- Las almohadillas están rellenas con un gel blando para dar comodidad.
- El Savant está cubierto con un tejido de nylon/licra duradero y suave.

Symmetric Designs no se responsabiliza del manejo incorrecto de este producto.

Tallas

Adulto

En el paciente:	
Circunferencia de la frente	22" - 24" 56 - 61 cm
1/2 Circunferencia detrás de las orejas	8" - 9" 20 - 30 cm
Reposacabezas en el adulto:	
Distancia interna de la parte alta del soporte	14" 36 cm
Distancia interna de la parte media del soporte	8" 20 cm
Altura total	6" 15 cm



El Savant está fabricado con un único núcleo de acero que permite una forma selectiva sin herramientas.



El disco del montaje se adapta a una bola de 2,5cm. El disco puede ser retirado para acoplar un hardware personalizado con tornillos de 5 mm.

- Adaptadores de hardware Whitmyer y Netti opcionales están disponibles.



El Savant viene con una banda de cabeza que puede ser usada para un soporte anterior.

El Savant puede ser llevado con o sin banda de cabeza.

Pequeña/Pediátrico

En el paciente:	
Circunferencia de la frente	18" - 22" 46 - 56 cm
1/2 Circunferencia detrás de las orejas	6" - 7" 15 - 18 cm
Reposacabezas pequeño:	
Distancia interna de la parte alta del soporte	12" 30 cm
Distancia interna de la parte media del soporte	7" 18 cm
Altura total	5" 13 cm