

## Benefici

### Per chi lo posiziona:

- semplice da posizionare
- facili modifiche con l'uso dei tubi intercambiabili
- accesso facile ad un tubo tracheale, se necessario
- controllo preciso del grado di supporto
- adattabile a casi di asimmetria

### Per il paziente e/o per chi si occupa del paziente

- un collare fresco e comodo
- bassa ritenzione di calore
- facile da indossare e togliere
- profilo discreto che non si nota
- contatto minimo con la pelle
- facile da tenere pulito
- supporto leggero per la testa

## Misure



CC01A



CC02C

La misura Adulto e' adatta per ragazzi dai 10 anni e adulti. La misura Bimbo e' adatta per bimbi da 1 fino a 10 anni. Il Collare canadese viene fornito gia' montato e pronto ad essere indossato.

## Bibliografia:

Per ulteriori letture e casi clinici:

"The Canadian Collar: A New Cervical Spine Orthosis  
Hannah R.E., Cottril, S.D.  
Am. Journal Occupational Therapy, pp 171-177,  
March, 1985, Vol. 39, Number 3

## Accessori

### Supporto mento grande CCOLC

Il supporto mento grande da' un maggiore supporto laterale. Puo' anche essere usato come supporto occipitale.



### Supporto mento bimbo CCOFC

Il supporto mento bimbo e' adatto a bambini a partire dai 6 mesi di eta'. Il supporto centrale nella foto e' il supporto standard

### Tubi aggiuntivi e raccordi CCOXT

Tubi aggiuntivi possono essere montati per dare un maggiore supporto laterale e personalizzare il collare in casi difficili. Il kit di accessori comprende tubi da 6.0, 7.5, 9.0 e 10 cm raccordi a T. Altre misure di raccordi sono disponibili su richiesta.



### Altri prodotti di qualita' da Symmetric Designs

Collare  
TOT



Ortesi per  
ginocchio e  
gomito



Collare  
Headmaster



[www.symmetric-designs.com](http://www.symmetric-designs.com)

# Il Collare Canadese



### Per un sostegno leggero della testa

Il **Collare Canadese** e' stato progettato per alleviare il dolore e i sintomi neurologici associati ai disordini della parte cervicale della spina. Questo collare innovativo e' indicato per Artrite reumatoide, Osteoartrite, Sclerosi laterale amiotrofica, Sclerosi multipla, ustioni e altre malattie che richiedono il sostegno leggero della testa e del collo.



Symmetric Designs

125 Knott Place, Salt Spring Island, BC V8K 2M4, CANADA

email: [sales@symmetric-designs.com](mailto:sales@symmetric-designs.com)

[www.symmetric-designs.com](http://www.symmetric-designs.com)

Tel: 250-537-2177 Fax: 250-537-1998

# Istruzioni per il posizionamento

Il collare canadese e' molto adattabile. Nella maggior parte dei casi si puo' posizionare solo con i tubi posteriori e anteriori. Per un maggior supporto laterale, vengono aggiunti i tubi laterali.



## Operazione 1

Rimuovere i supporti mento e petto. Rimuovere i tubi anteriori bianchi. Staccare i raccordi a T dalle estremita' del tubo plastico trasparente.



## Operazione 2

Misurare la lunghezza del tubo plastico trasparente necessario attorno al collo. Selezionare la lunghezza dei tubi anteriori, tenendo conto dello spazio necessario per il supporto mento e petto.



## Operazione 3

Accorciare i tubi trasparenti lasciando un po' di materiale in eccesso da correggere durante il posizionamento. Non tagliare i tubi troppo corti.



## Operazione 4

Inserire nuovamente i raccordi a T, i tubi anteriori e i supporti mento e petto.



## Operazione 5

Controllare il posizionamento. Modificare la lunghezza dei tubi trasparenti per correggere la posizione dei supporti mento e petto. Tagliando il tubo trasparente inferiore si puo' avvicinare il supporto petto.



## Controllo finale

Controllare che il collare sia comodo e simmetrico e che il supporto petto sia ben posizionato.

Tubi aggiuntivi possono dare maggior supporto laterale (come in figura). Tubi e raccordi a T aggiuntivi sono disponibili con il kit di accessori (vedere pagina precedente). I tubi possono essere tagliati con un coltello affilato.



I tubi bianchi posteriori devono appoggiarsi comodamente alla nuca. Per una maggior comodita' dei cuscinetti possono essere inseriti tra i raccordi a T.



Il collare viene indossato inserendo il supporto collo nel tubo anteriore alla sinistra del collare. Il supporto petto viene inserito dopo.



*Symmetric Designs non assume alcuna responsabilita' dovuta all'uso non corretto di questo prodotto.*