

Benefici

Per chi lo posiziona:

- facile da regolare (il poggiatesta puo' essere modellato a mano)
- si fissa su una struttura standard a tre punte
- uso della fascia frontale opzionale (inclusa) per un maggior supporto anteriore
- le fasce si possono facilmente modellare a mano quando il paziente viene riposizionato

Per il paziente e chi lo accudisce:

- un poggiatesta comodo e fresco, il disegno modulare delle fasce imbottite consente la circolazione dell'aria
- bassa ritenzione di calore
- un aspetto discreto che non si nota
- facile da pulire (con spugna acqua e sapone e asciugare all'aria)
- controllo totale della testa

Misure e colori



- Disponibile in misure da adulto e piccolo/ pediatrico
- Attualmente disponibile solo in nero – richiedete disponibilita' colori a Symmetric Designs

Accessori

Fasce laterali

Parte # SAVANT - SP

- Per maggior sostegno laterale



Questo supporto puo' essere anche usato come montatura di transizione

Adattatore Whitmyer

Parte # SAVANT - WA



- Questo adattatore consente al Poggiatesta Savant di essere montato su una struttura a sfera/whitmyer di 19mm

Adattatore Netti

Parte # SAVANT - NA



- Questo adattatore consente al Poggiatesta Savant di essere montato su una struttura Netti

Struttura montante per il poggiatesta

Parte #HRHCO

- Ha incorporata una sfera in acciaio da 19mm che consente un uso universale
- Verniciato con una finitura durabile in nylon



Altri prodotti di qualita' da Symmetric Designs

Prodotti ortopedici per il gomito e il ginocchio



Collare TOT



Collare Headmaster



www.symmetric-designs.com

Il poggiatesta Savant



Un poggiatesta per sedia a rotelle per un controllo totale della testa

Il poggiatesta Savant e' un sostegno nuovo e unico per la testa. E' fresco e leggero e puo' essere facilmente modellato a mano. Sostiene la testa in tre punti per controllare flessione e rotazione laterali. La fascia frontale puo' essere usata per un sostegno anteriore.



Symmetric Designs

125 Knott Place, Salt Spring Island, BC V8K 2M4, Canada

email: sales@symmetric-designs.com

www.symmetric-designs.com

Tel: 250-537-2177 Fax: 250-537-1998

Istruzioni d'uso

Scegliere la misura corretta

Il Poggiatesta Savant e' disponibile in due misure:

- adulto
- piccolo/pediatrico



Caratteristiche

Il poggiatesta Savant e' un sostegno nuovo e unico per la testa. E' fresco e leggero e puo' essere facilmente modellato a mano. Sostiene la testa in tre punti per controllare flessione e rotazione laterali. La fascia frontale puo' essere usata per un sostegno anteriore.

Misure

Adulto

Sul paziente	
Circonferenza alla fronte	22" - 24" 56 - 61 cm
½ Circonferenza dietro le orecchie	8" - 9" 20 - 30 cm
Sul poggiatesta adulto	
Distanza interna lungo supporto superiore	14" 36 cm
Distanza interna lungo supporto di mezzo	8" 20 cm
Altezza totale	6" 15 cm

Piccolo/pediatrico

Sul paziente	
Circonferenza alla fronte	18" - 22" 46 - 56 cm
½ Circonferenza dietro le orecchie	6" - 7" 15 - 18 cm
Sul poggiatesta piccolo	
Distanza interna lungo supporto superiore	12" 30 cm
Distanza interna lungo supporto di mezzo	7" 18 cm
Altezza totale	5" 13 cm



Il Savant e' costruito con uno scheletro in acciaio che consente di modellare il poggiatesta senza l'uso di strumenti.



Il disco di montatura ha una sfera di 25 mm. Il disco puo' essere smontato per agganciarsi ad altre montature con l'uso di viti M5.

- Adattatori Netti e Whitmyer sono opzioni disponibili



Il Savant include una fascia frontale che puo' essere usata per un maggior sostegno anteriore. Il Savant puo' essere indossato con o senza la fascia frontale.

- La discreta fascia frontale da' sostegno anteriore
- Ganci di facile apertura mantengono la fascia frontale in posizione e consentono modifiche per un corretto posizionamento



- Cuscinetti laterali alti controllano la flessione laterale
- Cuscinetti laterali medi hanno una forma comoda dietro le orecchie
- Cuscinetti sub-occipitali danno maggior sostegno sotto la mandibola
- I cuscinetti contengono un gel morbido per una maggior comoda'
- Il Savant e' rivestito con un tessuto morbido e durevole in nylon e lycra

Symmetric design non accetta alcuna responsabilita' dovuta all'uso non corretto di questo prodotto