

Benefici

Per chi lo prescrive:

- semplice da posizionare
- modifiche facili con l'uso dei tubi intercambiabili
- tubi più lunghi possono essere inseriti per un allineamento migliore
- pezzi di ricambio disponibili per tutte le componenti del collare

Per il paziente e chi lo accudisce:

- un collare comodo e con stile
- facile da posizionare e rimuovere
- un aspetto discreto che non si nota
- facile da pulire (acqua e sapone)
- livello di sostegno basato sulle necessità del paziente

Indicazioni

L'uso del collare "TOT" si aggiunge alla classica terapia dei bambini con Torcicollo miogeno congenito se hanno un'età di almeno 4 mesi e presentano un'inclinazione consistente della testa di almeno 5 gradi. Il bambino/a deve avere un adeguato raggio di movimento e un riflesso di sollevamento laterale della testa tanto da poter sollevare la testa dal lato del collare.

Bibliografia:

per ulteriori approfondimenti ed esempi clinici:

"Tubular Orthosis for Torticollis (TOT): A new approach to the Correction of Head Tilt in Congenital Muscular Torticollis" Mosterman et al [B.C.H.R.F. Study 1985-1986] (abstract copies available)

"The Determinants of Treatment Duration for Congenital Muscular Torticollis" - Emery, C. Physical Therapy - Vol 74, #10, October, 1994, pp 921-929

"TORTICOLLIS: Differential Diagnosis, Assessment and Treatment, Surgical Management and Bracing" ISBN 0-7890-0317-1 Karen Karmel-Ross; Published by Haworth Press

Riguardo il torcicollo congenito

Il torcicollo miogeno congenito è di solito diagnosticato nelle prime 4-8 settimane di vita. È caratterizzato da una contrazione del muscolo sternocleidomastoideo che causa la flessione laterale della testa dalla parte colpita e la rotazione della stessa verso la spalla opposta.

Se non viene corretta, questa postura può portare alla plagiocefalia e ad una scoliosi del torace.

Il collare TOT

Un cerchio di plastica in PVC morbido è separato da due corti tubi in nylon. Tubi di diverse misure sono forniti con il collare. Questi tubi sono posizionati anteriormente e posteriormente rispetto all'apice del muscolo trapezio. Il cerchio in PVC è mantenuto in posizione da una fascia di sostegno. Una fascia in Velcro di ricambio è inclusa. Il collare "TOT" è lavabile e non-tossico.

Scegliere la misura adatta

La misura bimbo (TOT01) è adatta a bambini dai 4 mesi ai 10 anni.

La misura adulto (TOT02) è adatta a ragazzi e adulti oltre i dieci anni.



Altri prodotti di qualità da Symmetric Designs:

Prodotti ortopedici per gomito e ginocchio



Il Collare Headmaster



Poggiatesta e sostegno per sedie a rotelle



www.symmetric-designs.com

Il collare TOT



Per il torcicollo miogeno congenito

Il collare TOT è stato disegnato per produrre uno stimolo indesiderato alla disposizione laterale della testa. Il paziente si allontana da questo stimolo verso una nuova posizione centrale e corretta. Questo consente al paziente di ristabilire la percezione dell'orizzontale e quindi di mantenere la posizione corretta della testa.

Il collare TOT è fornito montato e pronto all'uso



Symmetric Designs

125 Knott Place, Salt Spring Island, BC V8K 2M4, Canada

email: sales@symmetric-designs.com

www.symmetric-designs.com

Tel: 250-537-2177 Fax: 250-537-1998

Istruzioni per il posizionamento

Il collare e' fornito montato e pronto all'uso. La lunghezza del tubo in PVC trasparente e' pari a due volte la circonferenza del collo piu' 10-15 cm. Le estremita' sono unite da un cappuccio terminale.



I tubi distanziatori vengono scelti in base all'inclinazione della testa. Il tubo A copre la zona posteriore fino all'apice del muscolo trapezio e fino alla zona occipitale.



Il tubo B copre la zona anteriore fino all'apice del muscolo trapezio e sotto il processo mastoideo. Evitate pressione sulla mandibola.



Il tubo all'inizio devono essere corti e vengono sostituiti con tubi piu' lunghi durante la terapia.

Se l'inclinazione e' grave si consigliano tubi molto corti inizialmente.

Per un posizionamento corretto il neonato deve tenere la testa in posizione centrale, leggermente sollevata rispetto ai tubi distanziatori in modo da lasciare lo spessore di un dito tra il tubo in PVC e il collo.

Posizionate il collare comodamente all'inizio e assicuratevi che i tubi laterali siano corretti e di dimensioni giuste

Stringete il collare manualmente per controllarne la misura



Attenzione: non lasciate mai il bambino/a solo mentre indossa il collare.

Togliete il collare e fatene uscire il tubo PVC in piu'. Tagliatelo con un paio di forbici e riunite le estremita' con il cappuccio terminale. Riposizionate il collare dopo ogni modifica per controllarne la misura.



Attenzione: non tagliate troppo. Se il tubo e' troppo corto non si puo' piu' allungare o riconnettere.

Controllo finale

- Controllate che i tubi bianchi siano in posizione corretta rispetto all'apice del muscolo trapezio
- Assicuratevi che la persona che si occupa del paziente possa posizionare il collare correttamente (segnate il lato superiore se necessario)
- Controllate se ci sono arrossamenti dove i tubi distanziatori toccano la pelle
- potete coprire il collare con una calza di nylon di 4-5 cm. per renderlo piu' comodo



Per risultati migliori adottate una terapia di correzione graduale con il collare "TOT"

Corretto uso del collare "TOT"

- ✓ Place the Collar around the neck
- ✓ Posizionate i tubi bianchi e la fascia di sostegno
- ✓ Controllate la misura e d eventuali punti dolenti
- ✓ Pulite il collare regolarmente con acqua e sapone
- ✓ **togliete il collare durante i periodi di sonno**
- !! non lasciate il bambino/a solo/a mentre indossa il collare**

Symmetric Designs non accetta alcuna responsabilita' dovuta all'uso non corretto di questo prodotto