


Componenti individuali

Benefici

Bracciali prossimali o distali (viti incluse)		
Parte #	A	
	in	cm
CUFF 12	12	30
CUFF 11	11	28
CUFF 10	10	25
CUFF 9	9	23
CUFF 8	8	20
CUFF 7	7	18
CUFF 6	6	15
CUFF 5	5	13
CUFF 4	4	10
CUFF 3	3.5	9

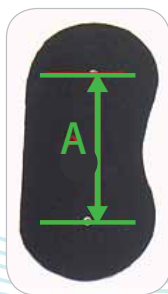

La misura del bracciale e' la meta' della circonferenza dell'arto. Per esempio il bracciale #7 e' corretto per un arto di 14 pollici di circonferenza.

Astine laterali (paio)		
Parte #	L	
	in	cm
BAR 19	19	48
BAR 17	17	43
BAR 15	15	38
BAR 13	13	33
BAR 11	11	28
BAR 09	9	23
BAR 07	7	18
BAR 05	5	13



Queste astine in acciaio inossidabile sono fornite in paia.

Cuscinetti per ginocchio e gomito				
Parte #	b		c	
	in	cm	in	cm
PAD60	6	15	7	18
PAD50	5	13	6.5	17
PAD45	4.5	12	6	15
PAD40	4	10	5	13
PAD35	3.5	9	4	10



Questi cuscinetti sono morbidi e modellati per l'arto. La cinghia in velcro puo' essere accorciata su misura.

Per l'estensione graduale del ginocchio e gomito

- E' adatta ad una vasta gamma di angoli di articolazione
- Si corregge quotidianamente per una terapia graduale ed efficace
- Veloce e facile da indossare
- Leggera, discreta e fresca da indossare

Queste ortesi sono progettate specialmente per la terapia graduale di contrazioni della flessione del ginocchio e del gomito. Le ortesi sono discrete, leggere e stabili sull'arto. Sono progettate per un uso di non-ambulazione. Da utilizzare con esercizi di allungamento e rilassamento per risultati migliori.



I bracciali sono pre-stampati e possono facilmente essere modellati a mano per ottenere la forma desiderata. I bracciali avvolgono l'arto saldamente mantenendo tuttavia la circolazione dell'aria grazie ai rilievi interni. Tutte le componenti sono intercambiabili per una corretta misura.

Altri prodotti di qualita' da Symmetric Designs

Il collare
Headmaster



Il collare
TOT



Poggiatesta da
sedia a rotelle



Symmetric Designs

www.symmetric-designs.com

Ortesi Canadese graduale per ginocchio e gomito



Per l'estensione graduale del ginocchio e del gomito

Queste ortesi innovative sono progettate per una terapia graduale di contrazioni di flessione del ginocchio e del gomito. Sono indicate per una vasta gamma di problematiche neuromuscolari e ortopediche. Le ortesi applicano una forza di estensione uniforme su tutto il cuscinetto basta semplicemente stringere le cinghie



Symmetric Designs

125 Knott Place, Salt Spring Island, BC V8K 2M4 Canada

email: sales@symmetric-designs.com

www.symmetric-designs.com

Istruzioni

L'arto deve essere esteso il più possibile prima del posizionamento dell'ortesi. La distanza tra il braccio e l'avambraccio deve essere misurata in questa posizione. (Per il ginocchio, si misuri dalla coscia al polpaccio con l'arto esteso il più possibile). Questa distanza determina la lunghezza delle astine laterali.

La circonferenza deve essere misurata ai punti superiori e inferiori dell'arto. La misura dei bracciali è pari alla metà della circonferenza in pollici. Per esempio il bracciale CUFF 7 è adatto ad una circonferenza di 14".

La misura del cuscinetto per il ginocchio e il gomito si basa sulla misura dei bracciali.

L'ortesi viene posizionata con l'arto esteso tanto quanto è possibile senza dolore. Le cinghie per i cuscinetti del ginocchio e gomito si stringono e il materiale in accesso viene tagliato. Le cinghie si stringono gradualmente durante la terapia con la riduzione della contrazione di flessione dell'arto.

Per risultati migliori da accoppiarsi ad esercizi di allungamento e rilassamento.



Per creare ortesi su misura

Selezionate le componenti dalla tabella seguente. Ciascuna ortesi necessita di un bracciale distale e prossimale basati sulla misura dell'arto. Ciascuna ortesi necessita inoltre due astine laterali basate sulla misura "L", e un cuscinetto.

Ortesi del Gomito



Misure Standard

Articolo #	Misura	Circonferenza Avambraccio (cm)	Circonferenza Braccio (cm)
ELB01	Grande	23 - 28	28 - 33
ELB02	Medio	18 - 23	23 - 28
ELB03	Piccolo	15 - 20	18 - 23
ELB04	Bimbo	13 - 18	15 - 20

Le ortesi standard per il gomito sono montate con l'uso delle componenti della seguente tabella

Articolo #	Modello Astine	Prossimale	Distale	Cuscinetto
ELB01	BAR11	CUFF6	CUFF5	PAD45
ELB02	BAR09	CUFF5	CUFF4	PAD40
ELB03	BAR07	CUFF4	CUFF3	PAD40
ELB04	BAR05	CUFF3	CUFF3	PAD35

Altre ortesi su misura disponibili

Ortesi del Ginocchio



Misure Standard

Articolo #	Misura	Circonferenza polpaccio (cm)	Circonferenza coscia (cm)
KE001	Grande	38 - 43	48 - 53
KE002	Medio	33 - 38	43 - 48
KE003	Piccolo	28 - 33	38 - 43
KE004	Junior	23 - 28	33 - 38
KE005	Bimbo	18 - 23	28 - 33

Le ortesi standard per il ginocchio sono montate con l'uso delle componenti della seguente tabella

Articolo #	Modello Astine	Prossimale	Distale	Cuscinetto
KE001	BAR15	CUFF10	CUFF8	PAD60
KE002	BAR13	CUFF9	CUFF7	PAD50
KE003	BAR11	CUFF8	CUFF6	PAD50
KE004	BAR09	CUFF7	CUFF5	PAD45
KE005	BAR07	CUFF6	CUFF5	PAD45

Altre ortesi su misura disponibili