

特徴

装着指導される方へ

- 適合調節が簡単です
- 必要な場合は、気管へも負担なくアクセス可能です。
- 患者さまへのしっかりとしたサポートができます。
- 別売部品で機能を調整変更することができます。
- カラーの各部品は、取り替え部品として用意されています。

装着される患者様、ケア担当される方へ

- 涼しく、快適なカラーです。
- 蒸れない保持ができます。
- 簡単な装着と取り外しができます。
- 清潔な使用を保てます。
- すっきりとしたデザインの外観です。
- 色を選べます。

洗い方の説明

- めるま湯の石鹼水で、湿らしたスポンジで洗って下さい。
- 湿らしたスポンジで十分に濯いで下さい。
- 自然乾燥して下さい。



サイズ

- ラージ、ミディアム、スモール、ジュニア、チャイルド、インファント

色

- グレー(標準色)、ブラック、ベージュ、ブルー
- (*インファントはグレーのみ、他は別注。各サイズ、レッドは別注)

別売部品

伸展パッド

Model #	Size	Fits
HMCPL	Large	Large & Medium
HMCPS	Small	Small & Junior
HMCPC	Child	Child & Infant



二つのパッドは、伸展や側方の支持のために位置を変えやすくできています。

ネックパッド

Model #	Size	Fits
HMNPL	Large	Large & Medium
HMNPS	Small	Small & Junior
HMNPC	Child	Child & Infant



快適な伸展支持のために通常は後部中央に位置させて使います。

前部補強用支柱

Model #	Size	Fits
AST 01	Large	Large & Medium
AST 02	Small	Small & Junior
AST 03	Child	Child & Infant



屈曲などに対して補強するために、前部に支柱(顎受けパッド付)を加えます。

(取り扱い義肢装具製作所・専門医療機関)

Made in Canada for the Fukui Company Ltd by
Symmetric Designs Ltd

フクイ株式会社

〒547-0032 大阪市平野区流町 1-8-18
TEL:06-6709-2496(代) FAX:06-6799-0035
info@291-jp.com

ヘッドマスターカラー



しっかりと確実な頭部の支持に

ヘッドマスターカラーは、頭部の最適なコントロールのために選ぶ抜かれた頸椎カラーです。この画期的で革新的な頸椎カラーは、オールラウンドの抜群なサポートを実現し、外観も素敵で、軽く、涼しく、ソフトな風合いに仕上げられ、色揃えもバラエティーにとんでいます。ヘッドマスターカラーは、専門家の手で簡単に適合調節でき、しっかりとした装着が可能です。

F.D.A.取得
義肢装具士・医療機関等の補装具専門家の指導の下で、正しくご使用ください

フクイ株式会社

(取り扱い説明書)

適切なサイズの選び方

- “a”の長さは、顎の先端から下顎の骨までの最短の長さを測ります。
(上写真を参照)
- 最も適切なサイズを下記の中から選び、迷う場合は小さい方のサイズを選んで下さい。



Collar Size	'a'		Size & Colours			
	in.	cm.	Grey	Black	Beige	Teal
Large	5	13	HMC01-G	HMC01-K	HMC01-B	HMC01-T
Med	4.5	11.5	HMC02-G	HMC02-K	HMC02-B	HMC02-T
Small	4	10	HMC03-G	HMC03-K	HMC03-B	HMC03-T
Junior	3.5	9	HMC04-G	HMC04-K	HMC04-B	HMC04-T
Child	3	7.5	HMC05-G	HMC05-K	HMC05-B	HMC05-T
Infant	2.5	6.5	HMC06-G	N/A	N/A	N/A

Caution: This product contains Natural Rubber (Latex) which May Cause Allergic Reactions

注意

この製品は内部に天然ゴムを含んでいます。
アレルギーの疑いがある方は、装着指導される専門家とご相談ください。

参考文献

For further reading and clinical examples:

“Managing Neck Weakness in Clients with Neuromuscular Disease”
- Trail, M. O.T. Practice, May, 1997, pp 53-56

“Headmaster Collar Restricts Rheumatoid Atlantoaxial Subluxation”
- Kauppi, M., Neva, H. & Kautiainen, H.
Spine - Vol. 24, No. 6, March 15, 1999, pp 526 - 528

ヘッドマスターカラーの型調整

- カラーを希望する高さで手で曲げます
- 調節した型を確認します。



- 必要に応じ、鎖骨に負担が掛からないよう調整します。
- 顎受けパッドは、必要ならばカラーの胸当ての部分に代用パッドとして追加できます。



- 特に伸展や屈曲のサポートが必要な場合
(別売部品参照)



最終チェック

- ヘッドマスターカラーが顎の下にぴったりと適合装着できたか確認してください。
- ネックストラップは首の後ろで留めるようにして下さい。



必要ならば補助として、ネックパッド、又は伸展パッドを、しっかりと支持・保持するために使ってください。(別売)

ヘッドマスターカラーの前部を補強するときは、前部補強用支柱を使います。(別売)

ご使用に際して

- ✓ この頸椎カラーは、医師、義肢装具士、理学療法士、作業療法士など、補装具や医療の専門家による装着指導と適合調整をお願いします。
- ✓ 適切なサイズの選択を確認してください。
- ✓ このカラーを他の部品や補助具に加えての改造等はお避け下さい。不適切な応用には責を負いません。