

Avantages

Pour l'essayeur:

- facile à adapter à la bonne taille (le repose-tête peut être modelé à la main)
- attaché aux trois points standard d'équipement
- utilisation optionnelle d'un bandeau (fourni) pour un support antérieur supplémentaire
- les coussinets sont faciles à remodeler à la main quand le passager change de position

Pour le porteur et/ou l'Aide soignant :

- un repose-tête frais et confortable, la conception modulaire des coussins permet une circulation de l'air
- faible conservation de la chaleur
- facile à mettre et à enlever
- discret; apparence effacée
- facile à garder propre (laver avec une éponge et de l'eau savonneuse, puis laisser sécher)
- contrôle total de la tête

Tailles et couleurs



- Disponible dans les tailles Adulte, Petit et Enfant

Actuellement disponible en noir seulement – consulter Symmetric Designs pour des couleurs supplémentaires

www.symmetric-designs.com

Accessories

Coussinet latéral

Partie: SAVANT-SP

pour un support latéral supplémentaire Ce support peut aussi être utilisé comme un bouton contrôle.



L'adaptateur Whitmyer

Partie: SAVANT-WA

Cet adaptateur permet au Savant d'être adapté à une boule de 22 mm / support d'équipement Whitmyer



L'adaptateur Netti

Partie: SAVANT-NA

Cet adaptateur permet au Savant d'être adapté au support d'équipement Netti.



Support d'équipement du repose-tête

Partie: HRHCO

Comporte une boule d'acier de 25mm permettant un réglage universel



Recouvert d'un apprêt résistant en nylon qui garde son fini plus longtemps.

D'autres excellents produits de Symmetric Designs

Minerve
Headmaster



La
Minerve OTT



L'appui-tête
Savant



Un repose-tête pour fauteuil roulant pour un contrôle total de la tête

L'appui-tête Savant™ est un support nouveau et unique pour la tête. Il est frais, léger et peut être facilement modelé à la main. Il fournit un support à trois niveaux de la tête afin de contrôler la flexion latérale et la rotation.

Un bandeau peut être utilisé pour un support antérieur.

 symmetric
designs



Emergo Europe
Molenstraat 15, 2513
BH The Hague, The Netherlands

Instructions d'ajustage

Choisir la taille correcte

Le Savant est disponible en deux tailles:

- Adulte
- Petite
- Enfant



Mesures: Sur le patient:

Circonférence au niveau du front	cm
Adulte	56 - 61
Petite	46 - 56
Enfant	36 - 46
1/2 circonférence derrière les oreilles	
Adulte	20 - 30
Petite	15 - 18
Enfant	13 - 15

Sur le petit repose-tête:

Distance intérieure le long du support supérieur	cm
Adulte	36
Petite	30
Enfant	23
Distance intérieure le long du support du milieu	
Adulte	20
Petite	18
Enfant	13
Hauteur totale	
Adulte	15
Petite	13
Enfant	12



Le Savant comporte une armature faite d'un acier particulier qui permet de donner la forme choisie sans outils.



Le disque de support s'adapte à une boule de 25mm. Ce disque peut être enlevé pour attacher un équipement personnalisé en utilisant des vis M5.

Des adaptateurs optionnels Netti et Whitmyer sont disponibles pour un tel équipement.



Le Savant est fourni avec un bandeau qui peut être utilisé pour un support antérieur.

Le Savant peut être porté avec ou sans le bandeau.

Caractéristiques

Le Savant est un support nouveau et unique pour la tête. Il est frais, léger et peut être facilement modelé à la main. Il fournit un support à trois niveaux de la tête afin de contrôler la flexion latérale et la rotation.

Un bandeau peut être utilisé pour un support antérieur

- Un bandeau discret fournit un support antérieur
- Des fixations faciles à relâcher tiennent le bandeau en place. Faciles à relâcher pour un ajustement minutieux



- Des coussinets en haut sur le côté fournissent un contrôle efficace de la flexion latérale
- Des coussinets à mi-hauteur sur le côté assurent le confort derrière les oreilles
- Des coussinets dans la partie sous-occipitale forment un support supplémentaire derrière la mandibule
- Les coussinets sont remplis d'un gel doux pour le confort
- Le Savant est recouvert d'un tissu doux et résistant tricoté en nylon/lycra

Symmetric Designs n'accepte aucune responsabilité résultant d'un mauvais usage de ce produit